



CATÉTER INTRAVENOSO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Catéter intravenoso.
Marca:	Arosa.
Material:	Catéter intravenoso periférico de teflón polimérico y poliuretano, el trocar es de acero quirúrgico con punta pulifa y biselada.
Color:	Transparente.
Tallas:	6,5 x 7 cm / 8,5 x 11,5 cm.
Presentación:	Ver especificaciones producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Un catéter venoso periférico es un dispositivo médico clase II, compuesto por un tubo delgado, teflonado y flexible que posee en su interior un trocar de acero con una punta biselada. Este trocar o cánula permite insertar el teflón de la vía venosa periférica en la vena del paciente. Este dispositivo se inserta por lo general en una vena del dorso de la mano o una vena del brazo del paciente en donde el profesional de salud pincha la vena con el trocar, y luego de manera coordinada va introduciendo el teflón en el lumen vascular mientras va retirando el trocar, hasta que solo queda el teflón al interior de la vena del paciente. Una vez que el tubo del catéter esta adentro de la vena, es usado para administrar sueros, medicamentos, antibióticos, analgésicos, transfusiones sanguíneas y/o quimioterapias endovenosas. Este insumo se usa de manera transversal en el área de la salud.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	Sí, en óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco, rango temperatura entre 10° y 40° C. Humedad máxima 80%.		
Uso:	No usar si el empaque está abierto o deteriorado. Una vez usado, eliminar en contenedores cortopunzantes.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La pared más delgada del teflón permite usar catéteres de menor calibre sin comprometer el flujo.
- El conector del catéter intravenoso es universal.
- El pulido del trocar del teflón permite usar menos presión al insertar un catéter en la vena del paciente, esto reduce considerablemente el trauma de la punción.
- Este producto no es reutilizable.
- El teflón polimérico y de poliuretano es radiopaco, por lo tanto, su estructura no deja pasar los rayos X, visualizándose de color blanco en una radiografía.
- El catéter esta protegido por una cámara de polipropileno que permite su correcta visualización.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Flujo que brinda el catéter	Calibre de aguja	Largo
AACATE03	99 ml/min	18G	1 1/4" IN (32 mm)
AACATE05	67ml/min	20G	1 1/4" IN (32 mm)
AACATE07	38ml/min	22G	1" IN (26 mm)
AACATE09	24ml/min	24G	3/4" IN (19 mm)

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- EC certificate
- ISO 13485-2016