

GASA PARAFINADA 10 X 10 CM



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Gasa parafinada 10 x 10 cm.
Marca:	Arosa.
Material:	Malla de gasa estéril parafinada, protegida con 2 láminas transparentes que mantiene el contenido oleoso en la malla. Envase externo oclusivo con capa interior metalizada para preservar la humedad.
Color:	Blanco.
Tallas:	10 x 10 cm.
Presentación:	Caja x 10 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	La gasa parafinada es un apósito estéril con un tejido abierto (malla). Es usado como apósito primario y su principal característica es brindar humedad a la herida, tiene nula adherencia a los tejidos, permite el libre paso del exudado al apósito secundario, brinda humedad y oxigenación adecuada, favorece la cicatrización. Es usada en áreas de injerto o dadores de tejido, laceraciones, ampollas, heridas superficiales y quemaduras tipo A. También se usa en úlceras tipo 2-3 con 100% tejido granulatorio.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	Sí, rayos gamma.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	En un lugar fresco y seco, mantener cajas y envases individuales indemnes. Una vez abierto o manchado el empaque pierde esterilidad.		
Uso:	En áreas de injerto, áreas dadoras de piel, quemados y úlceras tipo 2 - 3 con 100% tejido granulado. Producto de un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	El envase primario cuenta con el interior metalizado que impide la fuga de humedad de la gasa parafinada. La cara exterior del envase es un papel de grado médico grueso, donde están impresos los datos de trazabilidad del insumo.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Absorción: Baja, este apósito se usa en heridas con escaso exudado.
- Humedad: Excelente capacidad para mantener la humedad, la parafina es un coadyudante de la angiogénesis (formación de tejidos).
- Mantenimiento de temperatura: Excelente.
- Acción fibrinolítica: Baja acción para eliminar tejido de fibrina o esfácelo (tejido muerto dentro de una herida).
- Requiere apósito secundario: siempre, por su característica de no dejar la herida cerrada por el entramado de la malla, siempre necesita apósito de refuerzo.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Peso	Espesor
AAGAPA10	10 cm ± 0,2	10 cm ± 0,2	3,7 gr ± 0,2	0,321 mm ± 0,02

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 - 2016