

APÓSITO HIDROCOLOIDE ESTÁNDAR



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Apósito hidrocólicoide estándar
Marca:	Arosa.
Material:	La carboximetilcelulosa es el material base del hidrocólicoide. Este se encuentra en un soporte de espuma y film que actúa de barrera. La carboximetilcelulosa es un polisacárido que absorbe secreciones y agua, formando un gel de PH ácido y color café en contacto con la herida. Ese gel produce acción fibrinolítica eliminando el tejido muerto por acción autolítica, mantiene la humedad y la temperatura, favoreciendo la angiogénesis con la permanencia del apósito.
Color:	Café, con un borde más delgado, de 1 cm de diámetro que facilita su adhesión.
Tamaño:	10 x 10 cm.
Presentación:	Caja x 10 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Apósito bioactivo con forma de almohadilla que contiene partículas hidroactivas y absorbentes, que permiten absorber el exudado de escasa a mediana cantidad, manteniendo la humedad basal y la temperatura corporal fisiológica. Esto favorece la actividad fibrinolítica.		
Libre de Látex	Sí.	Estéril	Sí, rayos gamma.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar fresco y seco, mantener cajas y envases individuales indemnes. Una vez abierto o manchado el empaque pierde esterilidad.		
Uso	Heridas y úlceras con escaso o moderado exudado. Producto de un solo uso. No reutilizar.		
Empaque	Envase bilaminado; transparente por un lado y opaco por el otro con los datos de la trazabilidad impresos.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Absorción: Escasa a moderada cantidad.
- Humedad: Excelente capacidad de mantener una humedad fisiológica nacida sin macerar los bordes.
- Mantenimiento de temperatura: excelente, gracias al gel mantiene condiciones físicas óptimas para la cicatrización de la herida.
- Acción fibrinolítica: Muy buena, gracias a la mantención de la humedad, acidez y temperatura fisiológica.
- Requiere apósito secundario: Requiere con secreción moderada, para contener el gel y exudado que produce en conjunto la herida con el apósito.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Peso	Espesor
AAAPHI10	10 cm $\pm$ 0,2	10 cm $\pm$ 0,2	11 gr $\pm$ 0,1	0,97 mm $\pm$ 0,02

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO certificate 13485-2016