



SONDA FOLEY LÁTEX FORRADO EN SILICONA 2 VÍAS



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Sonda Foley látex forrado en silicona 2 vías.
Marca:	Arosa
Material:	Látex forrado en silicona.
Color:	Amarillo claro.
Tallas:	8 tamaños.
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Este dispositivo médico desechable permite el drenaje de la orina en todo paciente que necesite un cateterismo temporal o permanente. La sonda permite la salida de la orina desde la vejiga al recolector de orina. Para su anclaje en la vejiga posee un balón que se infla con agua destilada estéril y queda flotando dentro de este órgano, este balón se mantiene inflado todo el tiempo al poseer una válvula unidireccional, este anclaje evita la salida accidental de la sonda. La cantidad de agua con la que se infle el balón dependerá de cada tamaño de sonda, detallado en las especificaciones del producto.		
Libre de látex:	No.	Estéril:	Sí, óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y limpio. Temperatura de -5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Termoplástico	Sí: ☒ No: ☐	Atraumático	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Flexible	Sí: ☒ No: ☐	Curva natural en la punta de la sonda	Sí: ☒ No: ☐
- La indicación de instalación de sonda Foley es médica y su ejecución la realiza una enfermera(o). La preparación previa a la instalación incluye un prolijo aseo genital y posterior lubricación de la uretra con vaselinada o endogel estéril. - El tamaño de la sonda Foley que se usará, dependerá del tamaño del paciente. En general las sondas 8 y 10 FR, son usadas en pacientes pediátricos. A partir del tamaño 12FR se usa en paciente adulto. - Esta sonda Foley posee una punta distal con una curvatura natural, se caracteriza por ser redondeada, recta y atraumática. Cuenta con dos orificios laterales distales que drenan la orina dentro de la sonda hasta llegar a la bolsa recolectora. - El balón de la sonda se mantiene inflado todo el tiempo debido a que la conexión distal posee una válvula unidireccional. - Su conexión de drenaje es universal, facilitando su uso con toda bolsa recolectora de orina. - El French (FR) equivale al diámetro interno en milímetro (mm) de la sonda. - Para retirar la sonda, se debe primero drenar el líquido del balón interno de esta, ubicado en su extremo al interior de la vejiga. Para ello coloque una jeringa de 10 ml sin aguja en el acceso del lumen distal, donde previamente había inflado el balón, presione la válvula y aspire suavemente el contenido líquido. - Una vez retirada la sonda Foley, observe que el paciente logre orinar de manera espontánea e informe.					

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO					
Código Interno	Largo	Volumen del balón	FR	Peso	Diámetro externo
AASOFO12	39,6 cm	5-10 mL	12 FR	8,7 gr	4 mm
AASOFO14	40,1 cm	5-10 mL	14FR	9,7 gr	4,7 mm
AASOFO16	40cm	5-10 mL	16 FR	11,1 gr	5,3 mm
AASOFO18	40cm	5-10 mL	18 FR	12,3 gr	6 mm
AASOFO20	40cm	5-10 mL	20 FR	14,1 gr	6,7 mm