



Xinxiang Huaxi Sanitary Materials Co., Ltd.
Add: Dinglun Industrial Zone, Changyuan County, Xinxiang City, Henan Province, China,
TEL: 86-373-8996186. FAX:86-373-8996002
E-mail: exp@weian.com.cn Tel: 0086-15736983836
web: www.weian.en.alibaba.com, en.weian.com.cn


FICHA TÉCNICA

PAQUETE QUIRÚRGICO PARA CESÁREA


Aplicación

El paquete para cesárea está especialmente diseñado para contener todo lo necesario para la cirugía de parto por cesárea en el quirófano. Se envasan estériles para ahorrar tiempo y reducir los costos de preparación del quirófano. Cada paquete es estéril y desechable. Contiene una sábana para cesárea, cuatro batas quirúrgicas reforzadas, toallas de mano, cubierta de mesa quirúrgica, cubierta de mesa mayo y bolsa para suturas. Debido a su excelente calidad, este empaque para cesárea es muy popular en varios hospitales.


Imagen del producto

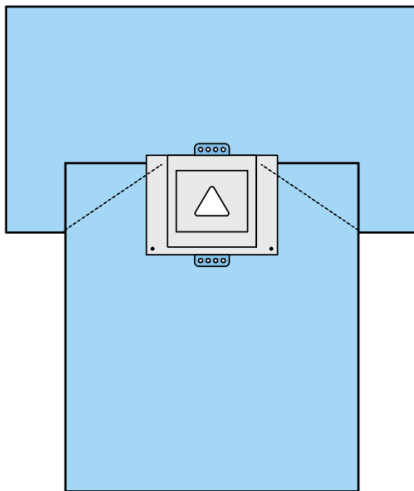

Sábana para cesárea

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


**Cobertor de
mesa quirúrgica**

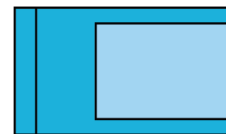

Cobertor mesa mayo



Toalla de mano

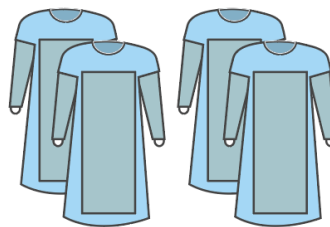

Bata quirúrgica reforzada



Bolsa de suturas



Xinxiang Huaxi Sanitary Materials Co., Ltd.

Add: Dingluan Industrial Zone, Changyuan County, Xinxiang City, Henan Province, China,

TEL: 86-373-8996186. FAX: 86-373-8996002

E-mail: exp@weian.com.cn Tel: 0086-15736983836

web: www.weian.en.alibaba.com, en.weian.com.cn

Accesorios Principales

No.	Componente Descripción	Tamaño	Cantidad
1	Batas Quirúrgicas Reforzadas	125 x 155cm	4 piezas
2	Bolsa de sutura	Papel	1 pieza
3	Toallas de mano	36 x 57	4 piezas
4	Cubierta de mesa mayo	Reforzado, 70 x 137 cm	1 pieza
5	Cubierta de la mesa quirúrgica	Reforzado, 150 x 230 cm	1 pieza
6	Sábana para cesárea	245 x 300 cm, bolsa recolectora 80 x 90 cm, Cinta 5cm, y porta tubos	1 pieza

Características del paquete quirúrgico de cesárea

- Material: SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) Spunbond tiene una mejor resistencia y tensión; Meltblown tiene una mejor resistencia al material no tejido bacteriano.
- Tela no tejida hidrofílica + película PE: Resistencia a la sangre, capacidad de resistencia al agua, resistencia al aceite y al alcohol.
- El producto se caracteriza por adecuarse a varios tipos de cirugía en las cuales se requieren el uso de batas, paños, toallas, campos y cobertores que se contienen en un solo paquete para reducir el tiempo de preparación de las instituciones médicas.
- Uso único: El producto es desechable, no se puede reutilizar. Todos los materiales se pueden recolectar y desechar después de la cirugía, lo que puede evitar la infección cruzada de manera efectiva.
- Comodidad: Todo el material está diseñado y fabricado con el máximo objetivo de protección, seguridad y comodidad tanto para pacientes como para cirujanos, especialmente en la cirugía de larga duración. Tienen la característica de poder usarse en procedimientos donde exista contacto con alcohol, sangre, aceite, entre otros, debido a su repelencia al agua y tratamiento antiestático, lo que asegura en gran medida que no habrá daño durante la cirugía.
- Seguridad: Los materiales no tejidos son cuidadosamente estudiados y elegidos para crear las mejores barreras para bacterias, sangre y otros fluidos. El polipropileno Spunbond tiene una alta resistencia a la abrasión, retardante de fuego, anticorrosión, mientras que el soplado en fusión tiene una alta propiedad de filtración y barrera. El SMS combina las ventajas de ambas telas no tejidas. Lo más importante es minimizar la infección cruzada durante la cirugía.
- Los campos quirúrgicos están equipados con cinta de doble cara para fijar en la incisión y evitar el cambio de posición.
- Color: Azul
- Esterilizado con Óxido de Etileno y no reutilizable.
- Vida útil: 5 años

Información de embalaje

Paquete universal	1 paquete/ bolsa	10 paquetes/ caja máster
--------------------------	-------------------------	---------------------------------

Almacenamiento

- Almacenamiento en ambiente seco, ventilado, mantener limpio, evitar el sol y la lluvia.
- Evitar fuentes de ignición y materiales inflamables.



Xinxiang Huaxi Sanitary Materials Co., Ltd.

Add: Dingluan Industrial Zone, Changyuan County, Xinxiang City, Henan Province, China,

TEL: 86-373-8996186. FAX:86-373-8996002

E-mail: exp@weian.com.cn Tel: 0086-15736983836

web: www.weian.en.alibaba.com, en.weian.com.cn

Instrucciones

1. Antes de abrir el paquete, verifique que no esté dañado o si el paquete esta vencido; en caso afirmativo, deséchelo.
2. Cuando abra el paquete, tenga cuidado que sus manos no toquen ningún componente dentro del paquete.
3. Saque el paquete de la mesa de instrumentos y luego rasgue la etiqueta con cuidado de acuerdo con las instrucciones.
4. Cuando abra la cubierta de la mesa quirúrgica, tenga cuidado que el lado izquierdo y el derecho se extiendan primero, luego la parte inferior y por último la parte superior, así se asegura de que la cubierta de la mesa esté plana en la mesa quirúrgica. Tenga cuidado que la cubierta de la mesa caiga entre 30 y 40 cm a cada lado.
5. Cuando abra la cubierta para la mesa mayo, tenga cuidado de seguir las instrucciones en la etiqueta y coloque las manos en la cubierta de la mesa mayo y luego en la bandeja de instrumentos, hasta que se fortalezca la parte sobre la bandeja. La cubierta mantiene la bandeja de instrumentos estéril y después de la cirugía, también puede utilizarse como bolsa de basura.
6. La toalla de mano sirve para que los médicos y el personal se sequen las manos al entrar al quirófano.
7. Coloque la sábana inferior debajo del paciente, las sábanas laterales grandes en el lado izquierdo y derecho; estas constituyen el primer sistema de barrera estéril. Luego se utilizan las pequeñas cortinas laterales adhesivas para colocar alrededor del paciente, que constituyen el segundo sistema de barrera estéril.



Xinxiang Huaxi Sanitary Materials Co., Ltd.

Add: Dingluan Industrial Zone, Changyuan County, Xinxiang City, Henan Province, China,

TEL: 86-373-8996186. FAX:86-373-8996002

E-mail: exp@weian.com.cn Tel: 0086-15736983836

web: www.weian.en.alibaba.com, en.weian.com.cn

Descripción de componentes

Bata quirúrgica reforzada

4 Unidades de batas quirúrgicas reforzadas de 125 x 155 cm, de material SMS (tres capas) de 40g/mt², con tratamiento antiestático, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos con densidad menor al alcohol o sangre, con resistencia a la tensión y al desgarre, minimizante de chispa y no inflamable. Empaque individual y estéril. Certificación AAMI PB70 NIVEL3 y EN13795.

Bolsa de suturas

1 Unidad de bolsa de papel de 16 x 30 cm, estéril.

Toalla de manos

4 Unidades de toallas de mano de 31 x 51 cm de papel de 65g/mt², estéril.

Cobertor de mesa de mayo

1 Unidad de cobertor de 60 x 137 cm, de tela 55g g/mt² PE + 40g/mt², SMS, estéril.

Cobertor de mesa quirúrgica

1 Unidad de sábana tipo cobertor de mesa quirúrgica de 150 x 230 cm. de material 27g/mt² PE + 30g/mt² PP con tratamiento antiestático, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos con densidad menor al alcohol o sangre, con resistencia a la tensión y al desgarre, minimizante de chispa y no inflamable, estéril.

Sábana tipo C

1 Unidad de campo tipo C de 245 x 300 cm de material SMS (tres capas) de 45 g/mt², con tratamiento antiestático, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos con densidad menor al alcohol o sangre, con resistencia a la tensión y al desgarre, minimizante de chispa y no inflamable. Cuenta con bolsa recolectora de fluidos de 80 x 90 cm y válvula de drenaje. Cuenta con 4 porta tubos reforzados y con cinta adhesiva mínimo de 5 cm. de ancho, estéril.

Empaque

Bolsa de papel y plástico para esterilizar, con frente visible y marcador de esterilidad.
Empaque secundario individual de los componentes del paquete.